



## Liv Des +72

### Produktinformation

Flytande etanolbaserad ytdesinfektion med en alkoholhalt på 75%. Den används i koncentrerad form för att effektivt förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning (bakterier, svamp, virus) via ytor. Tillsats av tensid ökar alkoholens kontakt med ytan. pH 6-9. Produkten lämpar sig för ytor kontaminerade med kroppsvätskor, blod etc. alltså smutsiga ytor.

### Bruksanvisning

Vid svår nedsmutsning skall ytan som skall desinficeras först torkas av med en trasa och rengöringsmedel. Spruta ut rikligt med desinfektionsmedel på ytan som skall desinficeras, stryk noggrant ut och bearbeta därefter ytan med en ren torkduk eller luddfritt papper. Om ytan är mindre kan desinfektionsmedlet appliceras på torkduken. Det är viktigt att ytan är fuktig under hela verkningstiden, minst 1 min, generell verkningstid 1-5 minuter. Ytan ska lufttorka. Använd skyddshandskar för att förhindra uttorkning av huden.

### Produktdata

Artikelnummer	Benämning	Antal/kartong	EAN
17239300	Liv Des +72 300 ml	24 * 300ml	7391443172304
17230001	Liv Des +72 1L	12 * 1L	7391443172335
1723M001	Liv Des +72 1L Membrankapsyl	12 * 1L	7391443172380
17230005	Liv Des +72 5L	2 * 5L	7391443172359

UNSPC: 42281604





## Liv Des +72

Verkningstid/virkningstid/vaikutus aika

Bactericidal	EN13727:	.....	5min
Bactericidal	EN13697:	.....	2min
Bactericidal	EN16615:	.....	5min
Yeasticidal	EN13624:	.....	5min
Yeasticidal	EN13697:	.....	2min
Yeasticidal	EN16615:	.....	5min
Fungicidal	EN13624:	.....	5min
Virucidal	EN14476		
	Höljeförsedda virus:	.....	1min
	Murine Norovirus:	.....	5min

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

### Hantering

Förvaringstemperatur bör ligga mellan -20 och 30 grader.

3 års hållbarhet i öppnad förpackning. 12 månader efter öppnande

Tomma och ursköljda emballage ska sorteras som "förpackning av plast".

